

carefix[®]
Creating functional comfort



Promove a cicatrização
através de compressão
controlada.


Fácil de colocar e
permite uma fácil
examinação.

Garante o máximo
conforto.



SOPHIA

Sutiã Pós-Operatório

Sutiã de compressão/colete cirúrgico

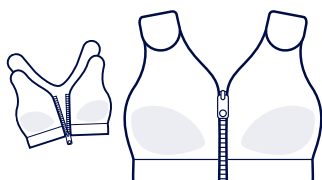

TYTEX[®]

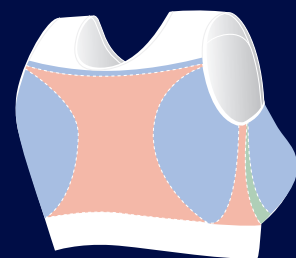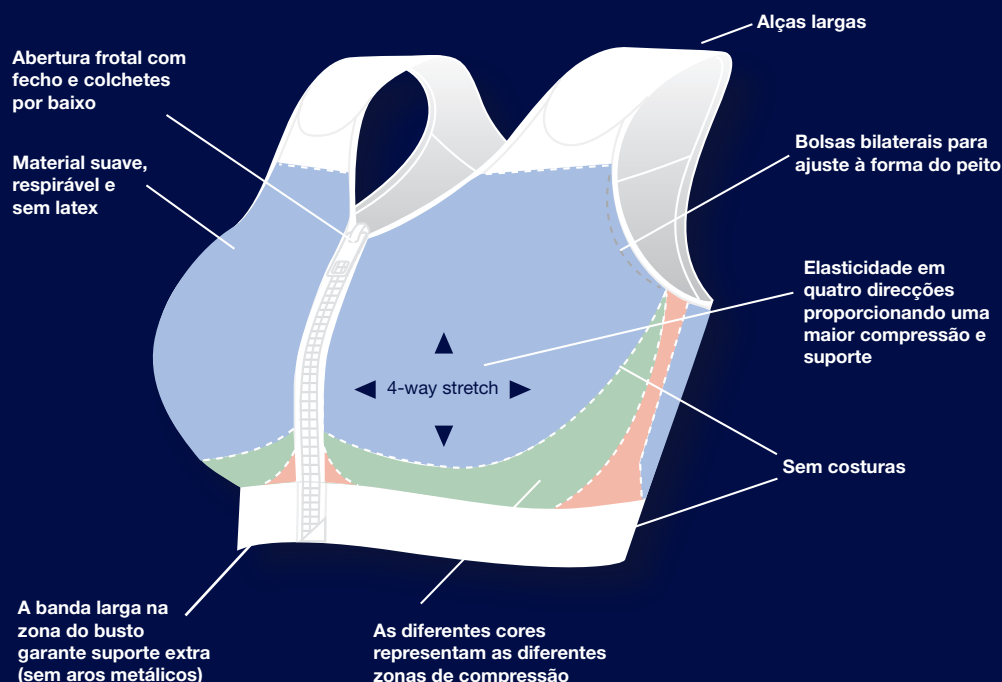

Zonas de compressão na zona das costas



O sutiã permite a abertura total de modo a facilitar a sua utilização (abertura na zona do peito e nos ombros)

O sutiã / colete pós-operatório Sophia oferece uma total estabilização e imobilização da zona intervencionada. Promove o processo de recuperação através da compressão controlada executada sobre a zona a cicatrizar.

O fecho frontal e as alças com velcro permitem uma fácil colocação do sutiã, facilitando a examinação da zona intervencionada.

O facto de não ter qualquer costura torna-o mais confortável, prevenindo o aparecimento de irritações cutâneas.

Indicações:

Dispositivo médico indicado para utilização após cirurgia ao peito (com bolsas para próteses em espuma).

Precauções:

Em caso de dúvida relativamente à utilização ou ao tamanho adequado, por favor, consulte o seu médico ou enfermeiro. Certifique-se que o curativo ou tubo de drenagem estão correctamente colocados dentro do sutiã para evitar pontos de pressão e a obstrução dos tubos de drenagem. O sutiã deve ser retirado para tratamentos de radioterapia devido à existência de partes metálicas. Se verificar algum desconforto, irritação da zona intervencionada ou situação semelhante, por favor, consulte o seu médico ou enfermeiro. **ATENÇÃO:** Em caso de mastoplastia de aumento, será necessária a utilização de uma banda estabilizadora para os implantes. Cumpra as instruções do seu médico ou enfermeiro.

Tamanhos recomendados

Tamanho das faixas	EU	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm
	F/B/E	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140
US/UK	24 inch	26 inch	28 inch	30 inch	32 inch	34 inch	36 inch	38 inch	40 inch	42 inch	44 inch	46 inch	48 inch	50 inch	52 inch
Copa	A														
	B														
	C														
	D														
	DD														
	F														
	S	M	L	XL	XXL										

Disponível em branco e preto.

Composição:

78% Algodão
15% Poliamida
7% Elastano

Instruções de lavagem:



Coloured 40°C/105°F



White 60°C/140°F

Antes de lavar, fechar o fecho frontal e o velcro das alças. Pode lavar em conjunto com outras peças, desde que sejam de cores semelhantes e utilize um saco de lavagem. A utilização de lixívia ou desinfetante à base de cloro irá diminuir a durabilidade do sutiã.

Para mais informações por favor contactar:

inodia

Avenida Casal Ribeiro, 44B, 1000-093 Lisboa

Tel. 218 516 368

geral@inodia.pt | www.inodia.pt

[f https://www.facebook.com/inodia.pt/](https://www.facebook.com/inodia.pt/)